

OHJEET 2221 Magneettivyö sänkyyn haararemmillä

- Segufix magneettivyöt sänkyyn on suunniteltu rajoittamaan liikettä ja ylläpitämään asentoa ehkäisten makuuhaavoja
- Kiinnitys tapahtuu magneettilukoilla ja avaimilla, mikä estää potilasta itseään tai asiattomia henkilöitä avaamasta vyötä
- Kiinteä haararemmi estää liukumisen alaspäin
- Sallii säädettävissä olevan määrän sivuttaisliikettä
- Sallii istumaannousun, jonka voi rajottaa lisäosina myytävillä 2203/2212 hartiovöillä
- Sisältää tarvittavat magneettilukot ja magneettiavaimet
- Voi kutistua pesussa n. 8%:n saakka

Magneettivyön kiinnittäminen sänkyyn (ks. kuvat alkuperäisestä ohjeesta):

Levitä magneettivyö sängylle kohtaan, johon asiakkaan vatsa tulee siten, että haararemmi (F) lähtee jalkapäästä kohden. Alemman osan (A) jatkeena ovat sänkykiinnitysremmit (B), jotka pujotetaan sängyn sivurungon ympäri, kiristetään kunnolla ja kiinnitetään itseensä magneettilukolla (1). Vyötä ei siis pyöräytetä koko sängyn ympäri. Magneettilukon metalliosa laitetaan remmin (B) tyvipäässä olevaan ”taskuun”, jolloin se pysyy tallessa vyötä käytettäessä eli lukkoa avattaessa ja suljettaessa.

Magneettivyön kiinnittäminen käyttäjälle:

Levitä vyöosa (D) kokonaan auki sivuille ja haararemmi (F) alaspäin. Aseta käyttäjä tämän päälle selinmakuulle. Laita vyöosa (D) käyttäjän lantion ympärille ja kiinnitä vyön puolet sekä haararemmi (F) samasta kohdasta (2) toisiinsa magneettilukolla metallivahvistetuista aukoista sopivalle kireydelle. Magneettilukon metalliosa laitetaan vyöosan (D) alapuolelta ”taskuun”, jolloin se pysyy tallessa vyötä käytettäessä eli lukkoa avattaessa ja suljettaessa.

Sallitun kiertoliikkeen määrän säätäminen:

Pujota vyöosasta sivuille lähtevät remmit (E) lenkin (G) kautta ja kiinnitä sopivasta kohdasta samojen magneettilukkojen (3) alle, jolla alempi osa (B) on kiinnitettynä sängyn runkoon. Näillä remmeillä (E) säädetään käyttäjälle sallittavan kiertoliikkeen määrä.

Magneettilukon aukaisu:

Paina lukkonappia vyötä kohti jotta lukitusmekanismi ei ole rasiuttuna. Aseta magneettiavain lukkonapin päälle ja vedä kokonaisuus suoraan pois päin vyöstä.

Hoito-ohje:

Päivittäinen puhdistus kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella tarvittaessa. Konepestävä 95 asteessa pesuohjeen mukaisesti.

TÄRKEÄÄ!!! Segufix tuotteita ei saa asentaa käyttäjälle ilman käyttöohjeita tai tietoa niiden toiminnasta. Käytä aina sivurajoittajaremmiä sekä haararemmiä, ettei käyttäjä pääse tippumaan sängystä jääden roikkumaan vyön varaan. Näiden käyttämättä jättäminen ja ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai tukehtumisen. **Käyttäjää ei saa jättää ilman valvontaa.**

OHJEET 2203/2212 Hartiavyöt magneettilukolla (lisävaruste 2221 magneettivyöhön)

- Estävät käyttäjän luisumisen ylöspäin
- Mahdollisuus estää myös istumaannouseminen

Hartiavöiden 2203 kiinnittäminen magneettivyöhön 2221 (ks. kuvat englanninkielisestä ohjeesta):

- Hartiavyöt (2203) koostuu kolmesta yhteen ommellusta remmistä (kuvassa A1/A2, B ja C)
- Aseta pisin kolmesta remmistä (A1/A2) sängylle samansuuntaisesti 2221 vyön (F) kanssa, sen yläpuolelle. Vyöt ovat oikeinpäin, kun pehmusteet kääntyvät sisäänpäin eli käyttäjää vasten yhdistettäessä remmin (A1/A2) päät toisiinsa. Oikaise hartiovöiden päät B ja C sängyn yläpäätä kohden.
- Pujota remmin päät (A1/A2) magneettivyön 2221 (F) lenkeistä (D).
- Nyt hartiovöiden 2203 on yhdistetty magneettivyöhön 2221 (F) ja se on valmiina käyttäjää varten

Hartiavöiden 2203 kiinnittäminen käyttäjälle:

- Aseta käyttäjä vöiden päälle selinmakuulle. Vedä hartiovöiden ylöspäin osoittavat päät (B ja C) käyttäjän hartioiden yli eteen ja kiinnitä ne molemmat 2221 vyöhön (F) saman magneettilukon alle jolla itse 2221 vyö kiinnitetään. (katso "Picture 1")
- Vie hartiovöiden remmi (A1) käyttäjän oikea kainalon alta ja pujota yhdestä oikeanpuoleisessa hartiaremmissä olevista aukoista (E) käyttäjän koon mukaan ja kiinnitä se magneettilukolla vasemmanpuoleisen hartiovöiden (1) (katso "Picture 2")
- Vie hartiovöiden remmi (A2) käyttäjän vasemman kainalon alta, kiristä se napakasti ja kiinnitä samaan lukkoon (1) toiselta puolelta tulevan remmin (A1) kanssa.
- Varmista, ettei yksikään remmi paina käyttäjän kaulaa/kurkkua. Remmien täytyy olla kiinnitetty napakasti, mutta ei vaikeutaa hengitystä. Sormet pitäisi pystyä saamaan remmien ja käyttäjän väliin suorana.

Hartiavöiden lisäremmien 2212 käyttäminen (istumaannousun rajoittamiseen, ei kuulu 2222 settiin):

- Hartiovöiden lisäremmit (A) ja (B) koostuvat kahdesta remmistä joiden toisissa päissä on D-lenkit (2)
- Pujota toisen lisäremmien (A) pää hartiovöiden 2203 olevasta D-lenkistä (3) ja vedä se loppuun saakka. Pujota saman lisäremmien (A) sama pää remmin itsensä toisessa päässä olevasta D-lenkistä (2) ja kiristä loppuun saakka. Kiinnitä toinen lisärempi (B) samalla tavalla toiselle puolelle
- Pujota remmien (A) ja (B) päät sängyn yläpäätä olevan runkoputken ympäri ja kiinnitä napakasti magneettilukolla itseensä

Magneettilukon aukaisu:

Paina lukkonappia vyötä kohti jotta lukitusmekanismi ei ole rasiittuna. Aseta magneettivöiden lukkonapin päälle ja vedä kokonaisuus suoraan pois vyöstä.

Hoito-ohje:

Päivittäinen puhdistus kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella tarvittaessa. Konepestävä 95 asteessa pesuohjeen mukaisesti.

TÄRKEÄÄ: Segufix tuotteita ei saa asentaa käyttäjälle ilman ohjeita/koulutusta tai tietoa niiden toiminnasta. Ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai tukehtumisen. **Käyttäjää ei saa jättää ilman valvontaa.**

OHJEET 2204 Rannevyöt magneettilukolla (lisävaruste 2221 magneettivyöhön)

- Rannevyöt, jotka kiinnitetään lisävarusteena Segufix 2221-magneettivyöhön
- Valmistettu 100% polyesteristä ja pehmustettu tekstiilivuorella
- Tarkoitettu sänkypotilaille, joiden käden liikkettä halutaan rajoittaa tai immobilisoida kokonaan
- Sisältää magneettilukot, jotka avataan ja suljetaan magneettiavaimella
- Ei sisällä magneettiavainta (avaamiseen käytetään 2221 magneettivyön avainta)
- 1 pari

1) Rannevöiden 2204 kiinnittäminen magneettivyöhön 2221 (ks. kuvat englanninkielisestä ohjeesta):

- Pujota Rannevyö (A) magneettivyön 2221 sivulla olevasta ”SEGUFIX”-logollisesta lenkistä (B) siten, että pehmuste on remmin yläpuolella sekä kohti käyttäjää.
- Vedä rannevyötä (A) siihen saakka kunnes lenkki (B) on magneettilukon (1) ja metallisen D-lenkin (2) välissä.

2) Rannevöiden 2204 kiinnittäminen käyttäjälle:

- Kierrä Rannevyön pehmustettu osa tiukasti käyttäjän ranteen ympärille ja kiinnitä tarra

3) Pujota Rannevyön vapaana oleva pää (C) metallisen D-lenkin (2) läpi ja ...

4) ... kiristä tiukasti takaisin rannevyöhön kiinnitettyyn magneettilukon metalliosaan

5) Kiinnitä magneettilukko

Rannevyön pitää olla napakka, mutta ei saa estää verenkiertoa.

Magneettilukon aukaisu:

Paina lukkonappia vyötä kohti jotta lukitusmekanismi ei ole rasiuttuna. Aseta magneettiavain lukkonapin päälle ja vedä kokonaisuus suoraan pois päin vyöstä.

Hoito-ohje:

Päivittäinen puhdistus kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella tarvittaessa. Konepestävä 95 asteessa pesuohjeen mukaisesti.

TÄRKEÄÄ: Segufix tuotteita ei saa asentaa käyttäjälle ilman ohjeita/koulutusta tai tietoa niiden toiminnasta. Ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai tukehtumisen. Käyttäjää ei saa jättää ilman valvontaa.

OHJEET 2205 Nilkkavyöt magneettilukolla sänkyyn (lisävaruste 2221 magneettivyöhön)

- Nilkkavyöt molempiin jalkoihin
- Kiinnitetään sängyn runkoon tulevaan vyöhön
- Tarkoitettu sänkypotilaille, joiden jalan/jalkojen liikkettä halutaan rajoittaa
- Avataan ja suljetaan magneettiavaimella
- Sisältää tarvittavat magneettilukot ja avaimet

Nilkkavöiden 2205 kiinnittäminen sänkyyn

Aseta kiinnitysremmi (A) käyttäjän nilkkojen korkeudelle siten että lenkit (B) ovat ylöspäin. Pujota kiinnitysremmin (A) vapaana olevat päät sängyn rakenteisiin molemmin puolin sisäpuolen kautta ulkopuolelle. Kiristä remmi niin kireäksi ettei se pääse liukumaan runkoa pitkin. Lukitse magneettilukoilla mahdollisimman kireäksi.

Nilkkavöiden 2205 kiinnittäminen käyttäjälle

Pujota lukon tappiosa (3) sille tarkoitetusta reiästä nilkkavyössä. Aseta nilkkaremmiin (C) pehmusteosa käyttäjän nilkan ympärille napakasti ja kiinnitä tarra. Pujota remmin vapaaksi jäänyt reiällinen osa (D) D-lenkkien (2) läpi, kiristä napakasti ja kiinnitä takaisin itseensä reiästä tappiosaan (3) ja kiinnitä magneettilukko. Nilkkamanstetin pitää olla napakka, mutta ei saa estää verenkiertoa.

Magneettilukon aukaisu:

Paina lukkonappia vyötä kohti jotta lukitusmekanismi ei ole rasiitettuna. Aseta magneettiavain lukkonapin päälle ja vedä kokonaisuus suoraan pois päin vyöstä.

Hoito-ohje:

Päivittäinen puhdistus kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella tarvittaessa. Konepestävä 95 asteessa pesuohjeen mukaisesti.

TÄRKEÄÄ: Segufix tuotteita ei saa asentaa käyttäjälle ilman ohjeita/koulutusta tai tietoa niiden toiminnasta. Näiden käyttämättä jättäminen ja ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai tukehtumisen. Käyttäjää ei saa jättää ilman valvontaa.