



Oulun Keskuspesula Oy

Kahvallinen vuodesuoja ohjeistus asiakkaalle

21.10.2025

Cliinissä on tarjota asiakkaalle kahdenlaista kahvallista vuodesuojaa. Alla hieman tuotteiden eroavaisuutta ja tarkempaa käyttötarkoitusta.

Tergo®Glide

ERGONOMINEN SIIRTOSUOJA

Medimatressin kahvallinen vuodesuoja on

- **MDR lääkinnällisten laitteiden asetuksen mukainen tuote, lääkinnällinen laite**
- **TergoGlide täyttää Suomen lain lääkinnällisistä laitteista ja tarvikkeista 629/2010**
- **Potilasturvallisuuden takaamiseksi TergoGlide on testattu ja hyväksytty ISO10535 mukaisesti**
- **TergoGlide on noston ja siirron apuväline ja täyttää potilas- ja turvallisuusstandardit. (Työturvallisuuslaki 738/2002):**
- **CE-merkitty tuote**

Tuotteen käyttötarkoitus on toimia apuvälineenä kääntämisessä ja siirtämisessä ja nostamisessa sekä inkontinenssisuojana vuoteessa.

TergoGlide liukuu poikittaissuuntaisesti lakanaa vasten (ei käytetä yhdessä erillisen liukulakanan kanssa) Vuoteen pituussuuntaisesti kangas on kitkainen, joten jarruttaa liukumista alaspäin selkänöjan olleessa kohotettuna.

Max. painoraja nostoille 250kg.



Muu kahvallinen liukuvuodesuoja

- Kahvallinen vuodesuoja toimii inkontinenssisuojan vuoteessa.
- Kahvallisen vuodesuojan käyttötarkoitus on olla hoitohenkilökunnan apuna potilaan makuualustalla tapahtuvissa asentohoidoissa, siirtämisessä ja kääntämisessä mutta vain ja ainoastaan makuualustalla tapahtuvissa.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu potilaan nostamiseen poissulkien vähäiset liikuttelut makuualustan päällä.
- Kahvallinen vuodesuoja ei täytä siirtämisen kriteereitä.



TILAUSOHJE:

Tergo Glide

Asiakkaan tarpeeseen hankittu tuote, joka ensitilauksen jälkeen kiertää pesusta takaisin asiakkaalle. Ensitilaus tehdään erillisellä tilauslomakkeella pesulan asiakaspalvelun sähköpostiin pesula.asiakaspalvelu@ppshp.fi. Tilauslomakkeen voi pyytää lähetettäväksi asiakaspalvelun sähköpostista. Lomake löytyy myös jatkossa Oys:än intranetistä.

Vuodesuojaa on kahta kokoa

88 cm * 120 cm

105 cm * 120 cm

Tergo Gliden hinnasta voi kysyä pesulan asiakaspalvelusta.
(pesula.asiakaspalvelu@ppshp.fi)

Muu kahvallinen vuodesuoja

Tilataan pesulan tilausjärjestelmästä, kuten muutkin liina- ja potilasvaatteet. Tuote on ns. yhteiskäyttöinen kertaveloitettava tuote.

Vuodesuojan koko

90 cm * 115 cm

Vuodesuojan hinnasta voi kysyä pesulan asiakaspalvelusta.
(pesula.asiakaspalvelu@ppshp.fi)